

Ελεγχόμενη ιατρική συσκευή-Οδοντιατρικό στύλβωτικό υλικό Χρωστικό υλικό για στεφάνη με βάση το πολυμερές. Υλικό συγκόλλησης για οδοντιατρική ρητίνη

Nu:le Coat

[Περιγραφή προϊόντος]

[Επιδιωκόμενος σκοπός]

Το Nu:le Coat χρησιμοποιείται για να στύλβώσει/γυαλίσει ή να σκληρύνει την επιφάνεια των αποκαταστάσεων ρητίνης, να ρυθμίσει το χρώμα των αποκαταστάσεων στεφάνης με βάση το πολυμερές και να συγκολλήσει τις αποκαταστάσεις ρητίνης.

[Ενδείξεις]

- Υαλοποίηση/Γυάλισμα ή σκλήρυνση της επιφάνειας των οδοντιατρικών αποκαταστάσεων
- Χαρακτηρισμός ή χρωματική προσαρμογή στεφανών με βάση το πολυμερές
- Συγκόλληση αποκαταστάσεων με βάση τη ρητίνη που χτίζονται επάνω σε PEEK.

[Προβλεπόμενοι χρήστες]

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες οδοντίατροι που έχουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση των οδοντιατρικών προϊόντων. Στοχευμένη ομάδα ασθενών: όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται οδοντιατρική θεραπεία, εκτός εάν η κατάσταση του ασθενούς, όπως μια γνωστή αλλεργία, περιορίζει τη χρήση.

[Κλινικό όφελος]

Επισκευή των δοντιών ενός ασθενούς με εφαρμογή στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό μιας οδοντικής αποκατάστασης ως οδοντιατρικό συγκολλητικό υλικό πλήρωσης/σφραγίσματος.

[Αντενδείξεις και Απαγορεύσεις]

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΕ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΑ Ή ΣΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ.

[Σχήμα, Σύσταση και Βασικές Αρχές]

Το προϊόν αυτό αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία και περιέχει τα ακόλουθα συστατικά:

Όνομασία συστατικού	Μορφή	Συστατικά
Nu:le Coat Gel	Gel	Πολυλειτουργικά μονομερή, ανόργανη ενίσχυση, κ.λπ.
Nu:le Coat Liquid (Διαφανές, A plus, B plus, C plus, D plus, Λευκό, Καφέ, Γκρι, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μπλε, Κόκκινο, Ροζ, Μαύρο, Gum, Σκούρο Καφέ HV)	Υγρό	Μονομερή μεθακρυλικού οξέος, πολυλειτουργικά μονομερή, ανόργανη ενίσχυση, χρωστικές ουσίες κ.λπ.

[Θεμελιώδης Αρχή]

Το προϊόν αυτό εφαρμόζεται στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό της οδοντιατρικής αποκατάστασης και πολυμερίζεται με ακτινοβολία ορατού φωτός.

[Προβλεπόμενη Χρήση & Αποτελέσματα/Αποτελεσματικότητα]

- Γυάλισμα της επιφάνειας οδοντιατρικών αποκαταστάσεων (σύνθετη ρητίνη για στεφάνες και γέφυρες, ακρυλική ρητίνη, οδοντιατρικό υλικό αποκατάστασης με βάση τη ρητίνη κ.λπ.)
- Χαρακτηρισμός και ρύθμιση του χρώματος στεφανών με βάση το πολυμερές (σύνθετη ρητίνη για στεφάνες και γέφυρες, υλικό ρητίνης για οδοντιατρική κοπή και κατεργασία, οδοντιατρικό υλικό αποκατάστασης με βάση την ρητίνη, κ.λπ.)
- Δεν προορίζεται να χαρακτηρίσει τα φυσικά δόντια.
- Επεξεργασία της επιφάνειας όταν οι αποκαταστάσεις με βάση τη ρητίνη (σύνθετη ρητίνη για στεφάνες και γέφυρες κ.λπ.) εφαρμόζονται σε υλικό με βάση ΡΑΕΚ (ΡΕΕΚ, ΡΕΚΚ κ.λπ.), πολυκαρβονική ρητίνη για οδοντιατρική κοπή και κατεργασία.

[Οδηγίες Χρήσης]

Οι συνθήκες για τη συσκευή φωτοπολυμερισμού και ο χρόνος πολυμερισμού φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Διαδικασία φωτοπολυμερισμού	LED Cure Master *1	Οδοντιατρικό φως πολυμερισμού*2
Προ-σκλήρυνση	30 δευτερόλεπτα.	10 δευτερόλεπτα.
Τελική σκλήρυνση	60 δευτερόλεπτα.	20 δευτερόλεπτα.

*1 Οδοντιατρική συσκευή φωτοπολυμερισμού που πωλείται από την YAMAKIN.

*2 Οδοντιατρική συσκευή φωτοπολυμερισμού για πρακτική εξάσκηση: Ανατρέξτε στις οδηγίες κάθε συσκευής και επιβεβαιώστε ότι ο ακτινοβολητής φωτός που θα χρησιμοποιηθεί έχει ενεργό μήκος κύματος (Μωβ φως LED κ.λπ.: 400 ±20 nm) για αυτό το προϊόν. Για το αποτελεσματικό μήκος κύματος, επικοινωνήστε με τον διανομέα της συσκευής φωτοπολυμερισμού.

[Υλικά για χρήση σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν]

Σύνθετη ρητίνη για στεφάνες και γέφυρες: Luna-Wing, TwiNY, κ.λπ.

Υλικό ρητίνης για οδοντιατρική κοπή και κατεργασία: KZR-CAD HR BLOCK2, KZR-CAD HR BLOCK3 GAMMATHETA κ.λπ.

Οδοντιατρικό υλικό αποκατάστασης με βάση τη ρητίνη: "iGOS", "TMR-Z Fill 10." "κ.λπ.

[Οδηγίες]

- Αύξηση της ομαλότητας της επιφάνειας της ρητίνης

(1) Τράχυνση της επιφάνειας της ρητίνης

Η επιφάνεια της σύνθετης ρητίνης για στεφάνες και γέφυρες θα πρέπει να γίνει πιο τραχιά με ανθρακορούνδιο κ.λπ., ή με αμμοβολή (περίπου 0,20 έως 0,25 MPa) με σωματίδια αλουμίνας (περίπου 50 μm) και στη συνέχεια να πλυθεί και να στεγνώσει.

(2) Επίστρωση

Το Nu:le Coat Liquid εφαρμόζεται στην επιφάνεια της ρητίνης και σκληραίνεται με φως.

Κατά τη χρήση του Nu:le Coat Gel, η επιφάνεια της ρητίνης πρέπει να επικαλυφθεί με Nu:le Coat Liquid για προεπεξεργασία, και μετά την προ-φωτοσκλήρυνση, εφαρμόζετε το Nu:le Coat Gel και φωτοπολυμερίζετε.

- Χαρακτηρισμός επιφάνειας

(1)Τράχυνση της επιφάνειας της ρητίνης

Μετά την τροποποίηση του σχήματος της επιφάνειας της ρητίνης, καθορίστε τη μορφολογία της επιφάνειας με ανθρακορούνδιο κ.λπ. ή αμμοβολή (περίπου 0,20 έως 0,25 MPa) με σωματίδια αλουμίνας (περίπου 50 μm) για να τραχύνετε την επιφάνεια, στη συνέχεια πλύνετε και στεγνώστε.

(2) Χαρακτηρισμός

Ανακινήστε καλά το μπουκάλι του Nu:le Coat Liquid, στη συνέχεια ρίξτε μια κατάλληλη ποσότητα Nu:le Coat Liquid σε μια πλάκα μιας χρήσης, στη συνέχεια αλώστε το σε λεπτή στρώση στην επιφάνεια της ρητίνης και προχωρήστε σε φωτοπολυμερισμό . Εάν είναι απαραίτητο, αναμειείτε πολλαπλά χρώματα Nu:le Coat Liquids για την προσαρμογή του χρώματος.

- Εσωτερικός χαρακτηρισμός

(1) Τοποθέτηση ρητίνης

Δημιουργήστε την εσωτερική δομή (τιμήμα οδοντίνης) με σύνθετη ρητίνη για στεφάνες και γέφυρες.

(2) Χαρακτηρισμός

Ανακινήστε καλά το μπουκάλι του Nu:le Coat Liquid, στη συνέχεια ρίξτε μια κατάλληλη ποσότητα Nu:le Coat Liquid σε μια πλάκα μιας χρήσης, στη συνέχεια αλώστε το σε λεπτή στρώση στην επιφάνεια της ρητίνης και προχωρήστε με την προ-σκλήρυνση. Εάν είναι απαραίτητο, αναμειείτε πολλαπλά χρώματα Nu:le Coat Liquids για την προσαρμογή του χρώματος.

(3) Δημιουργία του επιφανειακού στρώματος ρητίνης

Δημιουργήστε το επιφανειακό στρώμα (τιμήμα σμάλτου) με σύνθετη ρητίνη για στεφάνες και γέφυρες. Για σύνθετη ρητίνη για στεφάνες και γέφυρες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

- Τοποθετήστε τη ρητίνη σε υλικά με βάση το ΡΑΕΚ (ΡΕΕΚ, ΡΕΚΚ κ.λπ.) ή πολυκαρβονικό

(1) Τράχυνση της επιφάνειας

Κάντε την επιφάνεια της ρητίνης τραχιά με ανθρακορούνδιο κ.λπ. ή με αμμοβολή (περίπου 0,20 έως 0,25 MPa) με σωματίδια αλουμίνας (περίπου 50 μm). Καθαρίστε την επιφάνεια με ατμοκαθαριστή και στεγνώστε.

(2) Εφαρμογή και προ-σκλήρυνση

Εφαρμόστε το Nu:le Coat στην επιφάνεια και προχωρήστε με την προ-σκλήρυνση.

Επειδή το Nu:le Coat Liquid (Clear) έχει χαμηλό ιξώδες και λεπτή στρώση, πρέπει να εφαρμοστεί και να προ-σκληρυνθεί δύο φορές στην επιφάνεια τοποθέτησης (εφαρμόζεται δύο φορές). Εναλλακτικά, αναμειξτε το Nu:le Coat Liquid (Clear) και το Nu:le Coat Gel σε αναλογία 1:1 και εφαρμόστε το αμέσως στην επιφάνεια τοποθέτησης και προχωρήστε στην προ-σκλήρυνση.

(3) Τοποθέτηση ρητίνης και φωτοπολυμερισμός

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της σύνθετης ρητίνης για στεφάνες και γέφυρες.

[Σημείωση: Τεχνικές Οδηγίες & Σημαντικά Σημεία]

(1) Εάν η φωτοπολυμερισμός είναι ανεπαρκής, θα προκληθεί αποκόλληση ή αποχρωματισμός σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η συσκευή φωτοπολυμερισμού και ο χρόνος σκλήρυνσης πρέπει να ακολουθούν τις συνθήκες που περιγράφονται στις [Οδηγίες χρήσης]. Όταν χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές φωτοπολυμερισμού ή αν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την YAMAKIN.

(2) Εάν είναι δύσκολο να ακτινοβολήσετε το φως σε ολόκληρη την επιφάνεια που εφαρμόζεται, κάντε εκ νέου φωτοπολυμερισμό από τις άλλες κατευθύνσεις μετά τον προβλεπόμενο φωτοπολυμερισμό. Ανάλογα με τις συνθήκες φωτοπολυμερισμού, παρατείνετε το χρόνο φωτοπολυμερισμού όταν η επιφάνεια είναι ακόμα κολλώδης.

(3) Εάν αυτό το προϊόν εφαρμόζεται σε φωτεινά μέρη, όπως δίπλα στο παράθυρο ή κάτω από τα φώτα εργασίας, θα προκαλέσει σκλήρυνση κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη μακριά από έντονο φως.

- (4) Εάν η επιφάνεια της ρητίνης δεν είναι τραχιά πριν από την εφαρμογή αυτού του προϊόντος, η πρόσφυση μεταξύ αυτού του προϊόντος και της ρητίνης θα είναι ανεπαρκής και θα προκληθεί αποκόλληση. Επομένως, τραχύνετε την επιφάνεια της ρητίνης με ένα άκρο ανθρακορούндου ή με αμμοβολή με σωματίδια αλουμίνας.
- (5) Δεδομένου ότι το προϊόν αυτό μπορεί να φθαρεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, μην εφαρμόζετε το προϊόν αυτό σε σημεία όπου ασκείται άμεσα πίεση στη σύγκλειση.
- (6) Κλείστε το καπάκι αμέσως μετά τη χρήση για να αποφύγετε την αλλαγή του ιξώδους, επειδή το προϊόν αυτό περιέχει πτητικά συστατικά, τα οποία σκληραίνουν υπό το φως του περιβάλλοντος ή κατά την ανάμιξη με ξένα υλικά.
- (7) Δεδομένου ότι το υγρό αυτού του προϊόντος περιέχει πτητικά συστατικά, εφαρμόστε το αμέσως μετά τη λήψη του κανονικού χρόνου που είναι εντός 1 λεπτού. Όταν χρησιμοποιείτε την πλάκα μίας χρήσης που παρέχεται από την εταιρεία μας, θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός 4 λεπτών μετά τη λήψη.
- (8) Ανάλογα με το υλικό του δίσκου, ο δίσκος ενδέχεται να καταστραφεί από το προϊόν αυτό. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η πλάκα μίας χρήσης που παρέχεται από την εταιρεία μας για αυτό το προϊόν.
- (9) Μην επιστρέφετε το υγρό που συλλέγεται στο δοχείο, καθώς μπορεί να έχει σκληρύνει.
- (10) Κατά την τοποθέτηση της ρητίνης σε υλικά με βάση το PAEK (PEEK, PEKK, κ.λπ.), εάν το Nu:le Coat Liquid (Clear) και το Nu:le Coat Gel αναμιχθούν σε αναλογία 1:1 και αφεθούν για λίγο, το ιξώδες θα αυξηθεί επειδή τα πτητικά συστατικά θα εξατμιστούν και θα γίνει δύσκολη η εφαρμογή. Επομένως θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την ανάμιξη. Επιπλέον, όταν η περιοχή εφαρμογής είναι μεγάλη, το υγρό και η γέλη (gel) πρέπει να αναμιγνύονται και να εφαρμόζονται αρκετές φορές.
- (11) Κατά την εφαρμογή αυτού του προϊόντος στην επιφάνεια της ρητίνης, εάν η σκόνη κοιτής ρητίνης, τα συστατικά κεριού, η ομίχλη λαδιού και άλλα υλικά είναι προσκολλημένα στην επιφάνεια της ρητίνης, μπορεί να προκληθεί αποκόλληση, οπότε η επιφάνεια της ρητίνης θα πρέπει να καθαριστεί εκ των προτέρων.
- (12) Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στην αώλακα, λάβετε υπόψη ότι εάν το πάχος του προϊόντος αυξηθεί λόγω συσσώρευσης υγρού, η ιδιότητα σκληρύνσης θα μειωθεί.
- (13) Μετά την εφαρμογή αυτού του προϊόντος, η ξήρανση με αέρα πριν από τον φωτοπολυμερισμό μπορεί να προκαλέσει πιτσούλισμα ή ανομοιόμορφη επιφάνεια, επομένως η διαδικασία αυτή πρέπει να αποφεύγεται.
- (14) Εάν το Nu:le Coat Liquid εφαρμοστεί σε μεγάλη ποσότητα, μπορεί να προκαλέσει μειωμένη σκλήρυνση υπό το φως. Επομένως, το υγρό πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτή στρώση (όχι περισσότερο από 0,05 mm) και η περίσσεια του υγρού πρέπει να σκουπίζεται με βύσματα βαμβακιού.
- (15) Στην περίπτωση χρήσης οδοντιατρικού φωτός πολυμερισμού, εάν τα πτητικά συστατικά παραμένουν κατά τη διάρκεια του φωτοπολυμερισμού αμέσως μετά την εφαρμογή, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη σκλήρυνση. Επομένως, είναι απαραίτητο να στεγνώσει τον φυσικά για περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή πριν από τη σκλήρυνση. Επιπλέον, ο χρόνος σκλήρυνσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος όταν το συγκολλητικό υλικό παραμένει στην επιφάνεια.
- (16) Εάν η άκρη του πινέλου που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή αυτού του προϊόντος είναι ξεραμένη ή τραχιά, μπορεί να προκαλέσει την παγίδευση φυσαλίδων αέρα ή να αφήσει ίχνη από το πινέλο. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα πινέλο με καθαρή άκρη.
- (17) Το πινέλο που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή αυτού του προϊόντος πρέπει να καθαρίζεται με οινόπνευμα.
- (18) Εάν αυτό το προϊόν προσκολληθεί σε επιφάνειες που βλεννογόνου, όπως τα ούλα και τα χείλη, πριν από τη σκλήρυνση, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ελαστικός απομονωτήρας για την αποφυγή επαφής με τον στοματικό βλεννογόνο και τα χείλη. Σε περίπτωση προσκόλλησης στα ούλα, σκουπίστε το αμέσως με βύσματα βαμβακιού και καθαρίστε το με άφθονο τρεχούμενο νερό μετά την επέμβαση.
- (19) Αυτό το προϊόν περιέχει πτητικά συστατικά, επομένως οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες να αναπνέουν από τη μύτη όταν χρησιμοποιείται στη στοματική κοιλότητα.
- (20) Λόγω της πιθανότητας χρωματισμού, οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν οδηγίες να μειώσουν την κατανάλωση τροφίμων με έντονο χρώμα (κάφη, καφέ, μαύρο τσάι, κρασί κ.λπ.) εντός 3 ημερών μετά τη θεραπεία.
- (21) Σημειώστε ότι η δυνατότητα σκλήρυνσης αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστεί λόγω κακής ποιότητας λαμπτήρων ή σκόνης στη συσκευή φωτοπολυμερισμού .
- (22) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και υλικά με βάση την ευγενόλη μαζί, καθώς μπορεί να προκληθεί μειωμένη σκλήρυνση.
- (23) Όταν χρησιμοποιείτε το φορητό οδοντιατρικό φως πολυμερισμού, η ποσότητα του φωτός μειώνεται όταν αυτό απομακρύνεται από τη θύρα ακτινοβολήσης, επομένως η θύρα ακτινοβολήσης πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια που εφαρμόζεται η ακτινοβολήση.
- (24) Δεν επιτρέπεται η χρήση ακτινοβολίας φωτός που αποτελείται μόνο από μπλε πηγές φωτός LED χωρίς ιώδες LED.
- (25) Εφαρμόστε αυτό το προϊόν σε χώρο με όσο το δυνατόν λιγότερη σκόνη, διότι μπορεί να προκαλέσει την είσοδο ξένων ουσιών.
- (26) Μην αναμειγνύετε αυτό το προϊόν με άλλα προϊόντα.
- (27) Όταν χρησιμοποιείτε άλλες ιατρικές συσκευές μαζί, ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις στις οδηγίες χρήσης κάθε προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσετε.
- (28) Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος στη στοματική κοιλότητα, είναι απαραίτητο να διατηρείται η καθαρισμένη επιφάνεια συγκόλλησης και η επιφάνεια τοποθέτησης ααλλαγμένες από επιμολύνσεις αίματος, σάλιου, αιμοστατικών παραγόντων και άλλων υλικών πριν από τον φωτοπολυμερισμό. Σε περίπτωση μόλυνσης, η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να καθαριστεί και να στεγνώσει ξανά.
- (29) Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν δεν θα προσκολληθεί στα φυσικά δόντια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση εάν συγκολληθεί.

[Προφυλάξεις]

- (1) Για ασθενείς με ιστορικό αλλεργιών σε φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα, αζεσουάρ και χημικές ουσίες, ακόμη και αν δεν υπάρχει ιστορικό αλλεργιών σε αυτό το προϊόν και παρόμοια προϊόντα, θα πρέπει να τους δίνονται συμβουλές και το προϊόν να χρησιμοποιείται με προσοχή.
- (2) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε φωτιά, καθώς είναι εύφλεκτο. Επίσης, μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία ή απευθείας ήλιακό φως.
- (3) Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο, καθώς περιέχει πτητικά συστατικά (πολλάπλοι εξερισμοί ανά ώρα).
- (4) Κατά τη στίλβωση/γυάλισμα του σκληρυνμένου προϊόντος, για να αποφύγετε τις επιπτώσεις της σκόνης στο ανθρώπινο σώμα, χρησιμοποιήστε τοπική συσκευή εξαγωγής της σκόνης και μάσκες σκόνης εγκεκριμένες από δημόσιους φορείς για να αποφύγετε την εισπνοή σκόνης. Επίσης, φορέστε προστατευτικά γυαλιά για να αποφύγετε βλάβες στα μάτια.
- (5) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πέραν των συνιστώμενων περιπτώσεων, επιδράσεων και ενδείξεων.
- (6) Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν.

- (7) Απορρίψτε αυτό το προϊόν ως ιατρικό απόβλητο για την αποφυγή μόλυνσης.

[Σημαντικές βασικές προφυλάξεις]

- (1) Οι ασθενείς με αλλεργικά συμπτώματα όπως εξάνθημα και δερματίτιδα λόγω της χρήσης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να διακόψουν τη χρήση και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή.
- (2) Οι χειριστές με αλλεργικά συμπτώματα όπως εξάνθημα και δερματίτιδα λόγω της χρήσης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να διακόψουν τη χρήση και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή.
- (3) Μην αγγίζετε απευθείας το μη σκληρυνμένο υλικό αυτού του προϊόντος με γυμνά χέρια. Λάβετε προστατευτικά μέτρα, όπως το να φοράτε πλαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά για να αποτρέψετε την αλλεργία λόγω επαφής. Εάν κολλήσει στο δέρμα, σκουπίστε το αμέσως με οινόπνευμα σε ένα βαμβάκι και στη συνέχεια πλύνετε το με άφθονο τρεχούμενο νερό. Εάν εισέλθει στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό και ζητήστε την ιατρική βοήθεια ενός οφθαλμίατρου.
- (4) Προσέξτε να μην αφήσετε αυτό το προϊόν να προσκολληθεί στους μαλακούς ιστούς του στόματος ή στο δέρμα ή να μπει στα μάτια σας. Καλύπτε τα μάτια με μια πετσέτα για να προστατέψετε τον ασθενή από το υγρό που εκτοξεύεται.
- (5) Εάν αυτό το προϊόν προσκολληθεί στους μαλακούς ιστούς του στόματος ή στο δέρμα, σκουπίστε το αμέσως με οινόπνευμα σε βαμβάκι και στη συνέχεια πλύνετε το με άφθονο τρεχούμενο νερό. Εάν εισέλθει στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια από οφθαλμίατρο.
- (6) Προσέξτε να μην καταπιείτε κατά λάθος αυτό το προϊόν.
- (7) Δεδομένου ότι το επιφανειακό γυάλισμα δεν είναι μόνιμο, χρησιμοποιήστε το ως προσωρινή επεξεργασία στίλβωσης επιφάνειας.
- (8) Όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή φωτοπολυμερισμού χειρός, θα πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, καθώς μπορεί να βλάνει τα μάτια σας, και να μην κοιτάτε απευθείας στο φως ακτινοβολίας.
- (9) Το υγρό χρώμα αυτού του προϊόντος πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση, επειδή το χρωστικό υλικό τείνει να κατακάθεται. . Επίσης, αν το αφήσετε σε μια πλάκα μιας χρήσης, το χρωστικό υλικό θα κατακάτσει, γι' αυτό ανακατέψτε το με ένα πινέλο ή μια σπάτουλα πριν το χρησιμοποιήσετε.
- (10) Εάν το υγρό κολλήσει στο ακροφύσιο, μπορεί να έχει σκληρυνθεί, οπότε σκουπίστε το πριν κλείσετε το καπάκι.

[Χειρισμός και Φύλαξη]

- ① Το προϊόν αυτό πρέπει να διατηρείται μακριά από πηγές άμεσου φωτός, σε θερμοκρασία 4-25°C.
- ② Να διατηρείται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τη φωτιά. Μην τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα προϊόντων στην ίδια θέση αποθήκευσης
- ③ Εφοδιαστείτε με πυροσβεστήρα στους χώρους εργασίας και αποθήκευσης του προϊόντος.
- ④ Κρατήστε το προϊόν μακριά από μη ειδικευμένο προσωπικό.

[Σημείωση]

Εάν συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό που μπορεί να αποδοθεί σε αυτό το προϊόν, αναφέρετε το στον κατασκευαστή που φαίνεται πιο κάτω και στις ρυθμιστικές αρχές της χώρας στην οποία διαμένει ο χρήστης/ασθενής.

[Ημερομηνία Λήξης]

- ① Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν από την ημερομηνία λήξης * η οποία αναγράφεται στη συσκευασία.
- ② Η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία βασίζεται στην πιστοποίηση μας.
- ③ Η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης χρήσης.
- *[Επεξ.: YYYY-MM]σημαίνει την τελευταία μέρα του YYYY'έτους'/MM' μήνας' ως ημερομηνία λήξης)

[Συσκευασία]

[Μονή συσκευασία]

• Nu:le Coat Gel 2 ml

• Nu:le Coat Liquid (Clear) 6 ml

• Nu:le Coat Liquid (A plus, B plus, C plus, D plus, Λευκό, Καφέ, Γκρι, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μπλε, Κόκκινο, Ροζ, Μαύρο, Gum, Σκούρο Καφέ HV) 4 ml

[Συσκευασία σετ]

- Σετ εισαγωγής: Clear/Gel/Στρογγυλή βούρτσα/πινέλο × 1/ Επίπεδη βούρτσα × 1/Πλάκα μίας χρήσης ×10
- Κανονικό σετ: Clear/Gel/Λευκό/Γκρι/Μπλε/Καφέ/ Στρογγυλή βούρτσα/πινέλο × 1/ Επίπεδη βούρτσα × 1/ Πλάκα μίας χρήσης ×20
- Πλήρες σετ: Clear/Gel/Λευκό/Γκρι/Μπλε/Καφέ/Κίτρινο/Πορτοκαλί/A Plus/B Plus/C Plus/D Plus/ Στρογγυλή βούρτσα/πινέλο × 1/ Επίπεδη βούρτσα × 1/ Πλάκα μίας χρήσης × 30

YAMAKIN



YAMAKIN CO., LTD.

1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho,
Konan-shi, Kochi, 781-5451, Japan
E-Mail : contact@yamakin-gold.co.jp

CE 0123

[EC] [REP]

MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germany
Tel : +49 6894 581020 Fax : +49 6894 581021
E-Mail : info@mt-procons.com